

Instructie Bemonstering met Swabs:



Een Swab is een staafje met daaraan een borsteltje, waarmee op eenvoudige en pijnloze wijze materiaal aan de binnenkant van de wang kan worden afgenomen.

1. Neem de twee Swabs uit de verpakking en schraap hiermee stevig over de binnenkant van de wangen van het dier, ongeveer 2 keer aan elke kant. Probeer ervoor te zorgen dat het schaap de bek niet kan openmaken tijdens het nemen van de swab (de bek met één hand op mekaar houden), anders gaat hij er op kauwen. Steeds per dier twee swabs gebruiken.



FOUT



GOED

2. Plaats deze Swabs terug in de papieren verpakking en maak de verpakking dicht. Schrijf het bedrijfsnummer en het volgnummer op de verpakking van de swab.